

## 「遊離テストステロン/RIA 法」 新規受託開始のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記検査項目につきまして、測定試薬の販売中止に伴い、昨年1月31日受付分より検査の受託を中止しておりましたが、この度、新たな体外診断用医薬品として承認された測定試薬が販売開始されることになりました。

つきましては、2016年2月6日(土)受付分より検査の受託を開始させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2016年2月

【記】

### ◇検査要項

項 目 コ ー ド	3967
容 器	㊸:分離剤入り容器
検体量/保存方法	血清0.3ml/凍結
検 査 方 法	RIA(チューブ固相法)
基 準 範 囲	裏面㊸参照
報 告 範 囲	0.2 pg/ml未満～100 pg/ml以上
所 要 日 数	3日～6日
実施料/判断料	166点/144点(生化学的検査Ⅱ)
備 考	午前中に採血して下さい。 性別、年齢を必ず記入して下さい。

受託開始日:2016年2月6日(土)受付分より

**※ 基準範囲及び相関図は裏面をご参照下さい。**

お問い合わせは最寄りの営業所 または、  
本社・研究所にお願いいたします。


**株式会社 昭和メディカルサイエンス**  
 本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2  
 TEL 042 (795) 6000

※ 本項目は、旧測定試薬(RIA 法)に近似した結果が得られることが期待されてはおりますが、全く同等の結果ではないことから、基準値等が変更となります。

### ① 基準範囲

年齢	新(RIA法)		旧(RIA法)	
	男性 (pg/ml)	女性 (pg/ml)	男性 (pg/ml)	女性 (pg/ml)
20～29歳	7.6～23.8	0.4～2.3	8.5～27.9	2.7以下
30～39歳	6.5～17.7	0.6～2.5	7.6～23.1	1.9以下
40～49歳	4.7～21.6	0.3～1.8	7.7～21.6	1.1以下
50～59歳	4.6～19.6	0.8～1.7 (50歳以上)	6.9～18.4	1.0以下
60～69歳	5.3～11.5		5.4～16.7	—
70歳以上	4.6～16.9		4.5～13.8 (70～79歳)	— (70～79歳)

### 新旧二法の相関

