

PIVKA-II ご依頼の際の採血容器の注意

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、試薬会社(協和メデックス株式会社)より、「採血時に、ニプロ株式会社製の急速凝固採血管「ネオチューブ RC」及び「フリーチューブ RC」を用いた場合、PIVKA-IIのデータが低値化する事象が確認された」との報告がございました。

つきましては、PIVKA-IIをご依頼の際は、下記の急速凝固採血管のご使用は避けて頂き、ブレイン管や分離剤入容器(ネオチューブ SP 管)等の採血管をご使用して頂きますようお願い申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2016年3月

【記】

◇対象検査項目

項目コード : 5221

P I V K A - I I

◇影響が起こる採血管

- ・ニプロ株式会社 ネオチューブ RC シリーズ
- ・ニプロ株式会社 フリーチューブ RC